



Diversey™

Oxivir Excel Wipe CE

Detergente desinfectante de superficies y aparatos médicos no invasivos en toallitas

Descripción

Diversey Oxivir Excel Wipe CE es un limpiador desinfectante de amplio espectro de eficacia con tiempos de contacto muy reducidos. Basado en la tecnología patentada de Diversey de Peróxido de Hidrógeno Acelerado, la formulación de Oxivir Excel Foam CE puede ser aplicada para desinfección de aparatos y equipos médicos no invasivos.

Propiedades

- Bactericida, Virucida, Levuricida
- Desinfecta en 1 minuto
- Seguro con los pacientes los usuarios y las superficies
- Conveniente, no requiere preparación ni bayetas
- Sin perfume
- Se descompone en agua y oxígeno
- No deja residuos tras su aplicación

Beneficios


- Amplia eficacia que proporciona los más altos niveles de protección de los pacientes. Test de efectividad siguiendo la normativa europea. Posee actividad virucida completa, incluyendo Poliovirus, Adenovirus y Murine norovirus. Efectivo frente a virus envueltos VIH, VHB, VHC, Gripe, Vaccinia virus y Coronavirus.
- Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia desinfectante.
- Excelentes resultados de limpieza.
- Aplicación segura en el entorno del paciente, no irritante.
- La formulación AHP formulation es respetuosa con las superficies alargando su vida.
- Adecuado para uso en áreas de alto riesgo de infección, incluyendo quirófanos, UCIs, unidades de neonatos, y habitaciones de pacientes

Modo de empleo

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Abra el sobre saque una toallita y cierre la tapa.
3. Pase la toallita sobre la superficie que se desea desinfectar. Asegúrese de impregnar toda la superficie. Deje secar el producto al aire.
4. Asegúrese de que la superficie se mantiene húmeda el tiempo requerido de actuación.
5. Cambie la toallita cuando esté visiblemente sucia o cuando se cambie de área.



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

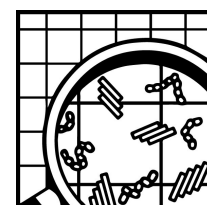

© A.I.S.E



Oxivir Excel Wipe CE

Información técnica

Apariencia:	Toallitas de polipropileno
Olor:	Neutral
pH (en uso):	1.95
Densidad Relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.00
Caducidad:	720 días

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos químicos. No se recomienda su uso en superficies sensibles al agua. En condiciones normales de uso, Oxivir Excel Wipe CE es compatible con la mayoría de materiales existentes en el entorno médico-hospitalario.

Información microbiológica

Eficacia probada de acuerdo con las normas EN13727, EN13624, EN14476 and EN16615.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

www.diverseym.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 27/01/2023 es-ES (K00248)